

## INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

### Reguli generale igienizare și întreținere furtun incalzit CPAP (tubulatura CPAP) Producător ResMed

#### Tubulatura încălzită – instrucțiuni de curățare

Curățați tubulatura încălzită înainte de prima utilizare și săptămânal.

1. Deconectați tubulatura încălzită de la umidificatorul încălzit.
2. Spălați ușor tubulatura încălzită, inclusiv conectorii, într-o soluție de apă caldă și un detergent de vase delicat pentru îndepărtarea adecvată a substanțelor aderente de pe tub și conectori.

Notă: Curățați în întregime suprafața internă a tubului, asigurându-vă că acesta este complet scufundat în soluția de detergent de vase, în timp ce îl agitați ușor în mână.

3. Clătiți bine cu apă pentru a îndepărta toate reziduurile de săpun de pe tub și conectori și lăsați să se usuce la aer. Asigurați-vă că tubul și conectorii sunt uscați înainte de următoarea utilizare.
4. Verificați dacă tubulatura încălzită prezintă urme de deteriorare sau uzură (fisuri, crăpături, rupturi, perforări, etc.). Aruncați și înlocuiți, dacă este necesar.

#### Modalitate de achiziție a tubulaturii încălzite

Adresați-vă reprezentantului Dvs VitalAire să vă arate tipul de circuite speciale încălzite disponibile și potrivite dispozitivului Dvs CPAP.

Tubulatura încălzită este un accesoriu opțional care este utilizat împreună cu umidificatorul încălzit pentru a controla umidificarea furnizată, poate diminua condensul și încălzește aerul, creând un confort suplimentar al terapiei Dvs.

**Aceste accesorii sunt disponibile la furnizorul Dvs de îngrijire la domiciliu și le puteți achiziționa suplimentar la cerere.**

