

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

Reguli generale igienizare și întreținere furtun CPAP (tubulatura CPAP) Producător ResMed

Verificare furtun CPAP

Verificati periodic (săptămânal) furtunul pentru avarii sau deteriorări și înlocuiți-l dacă este avariata.

Curățare furtun CPAP

Trebuie curățat săptămânal. Verificați ghidul pentru detalii în curățarea lui.

1. Spălați manual furtunul cu caldută (aproximativ 30 ° C) și puțin săpun lichid delicat de vase - neutru. Nu spălați furtunul la mașina de spălat.
2. Clătiți furtunul și lăsați-l să se usuce în aer liber.
3. Ștergeți furtunul pe exterior cu o lavetă uscată și curată. Furtul trebuie să fie bine uscat și pe interior și pe exterior înainte de a-l atașa din nou la aparat.



Imaginea este cu titlu de prezentare pentru exemplificarea furtunului CPAP.

Reconectarea furtunului CPAP

Când furtunul este uscat și interior și exterior, se poate reconecta la dispozitivul CPAP.

1. Conectați ferm furtunul de aer la orificiul de aer situat în partea din spate a dispozitivului CPAP.
2. Conectați ferm capătul liber al furtunului de aer la masca CPAP.
3. Asigurați-vă că furtunul CPAP este conectat ferm la ambele capete. Nu trageți și nu întindeți tubulatura.

Atentie: Nu curățați adaptorul de tubulatură și furtunul CPAP cu alcool, soluții care conțin înălbitor sau alcool sau soluții care contin balsamuri sau hidratante.

Orice abatere de la aceste instrucțiuni poate afecta performanțele produsului sau poate diminua performanțele terapiei CPAP.

Aceste accesorii sunt disponibile la furnizorul Dvs de îngrijire la domiciliu și le puteți achiziționa suplimentar la cerere.