


## Umidificator cu valva de protectie de 6 PSI

RO. Instructiuni de utilizare:

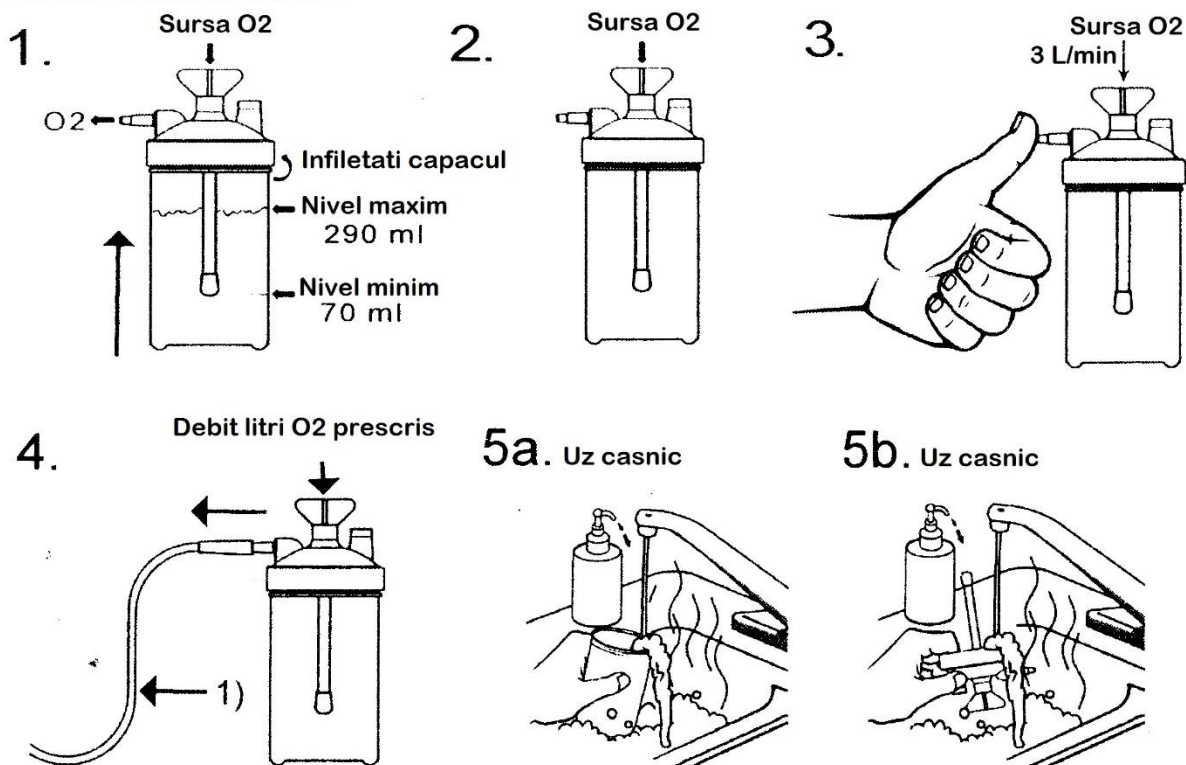

1. Adaugati apa pana la indicatorul de nivel maxim. Se recomanda apa sterila, distilata sau fiarta. Infiletati capacul si verificati daca acesta este etansat corespunzator.
2. Atasati umidificatorul la sursa de O2.
3. **ATENTIE:** Scurgerile pot reduce partial sau chiar total volumul de oxigen furnizat pacientului. Pentru a verifica posibilele scurgeri, porniti sursa de O2, setati aparatul la 3L/min si blocati iesirea. Valva de pe umidificator ar trebui sa se declanseze in aproximativ 5sec sau mai putin. Daca nu atunci verificati conexiunile.
4. Conectati tubulatura pentru oxigen (Nu este inclusa). Daca se declanseaza valva de pe umidificator atunci verificati tubulatura pentru eventuale: cute, rasuciri sau noduri.
5. **Uz in spitale:** Inlocuiti umidificatorul dupa 14 zile.  
**Uz casnic:** Spalati cu putin sapun si apa dupa care clatiti foarte bine odata la 14 zile. Daca utilizati apa de la reseaua curenta atunci repetati spalariile la interval de 72 de ore. Inlocuiti umidificatorul dupa 30 de zile.

**Utilizat pentru:** Adaugarea de umiditate la gazele inhalate de pacient.

**Contraindicatii:** Nici unul cunoscut.

**Pentru mai multe informatii:**

<http://www.salterlabs.com/additional-information>

