

Română

Portul conectorului de oxigen de la ResMed (26960) este un accesoriu validat pentru utilizarea cu până la 15 litri pe minut de oxigen suplimentar, alături de următoarele produse: VPAP™ III ST-A, VPAP™ III ST-A cu QuickNav, VPAP™ Auto 25, VPAP™ ST, VPAP™ S, VPAP™ IV și VPAP™ IV ST.



Portul conectorului de oxigen este proiectat să permită adăugarea de oxigen suplimentar la ieșirea generatorului de flux, reducând în același timp cantitatea de reflux de oxigen în generatorul de flux comparativ cu fittingurile de oxigen standard în formă de T.

Montarea portului de oxigen

1. Conectați ferm portul conectorului de oxigen (A) direct la orificiul de ieșire a aerului (B) al generatorului de flux sau al umidificatorului, conform ilustrațiilor.
2. Conectați tubul de aer la capătul portului pentru conectorul de oxigen (C), conform ilustrațiilor. Asigurați-vă că tubul este conectat la linia indicată (D).
3. Conectați tubul de alimentare cu oxigen la portul de intrare a oxigenului (E), conform ilustrațiilor.

Note:

- Săgețile de pe portul conectorului de oxigen trebuie să fie orientate de-a lungul direcției fluxului de aer - dinspre generatorul de debit.
- La un debit fix al oxigenului, concentrația de oxigen inhalat variază, în funcție de diverși factori, precum setările de presiune, modelul de respirație al pacientului, masca, punctul de aplicare și rata de scurgere.
- Atunci când se adaugă oxigen, asigurați-vă întotdeauna că verificați funcționarea corectă a declanșării și funcționării ciclice și activarea alarmei măștii, atunci când este activată.

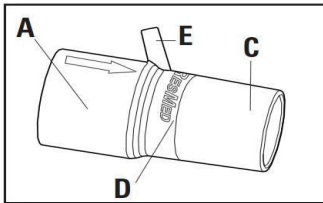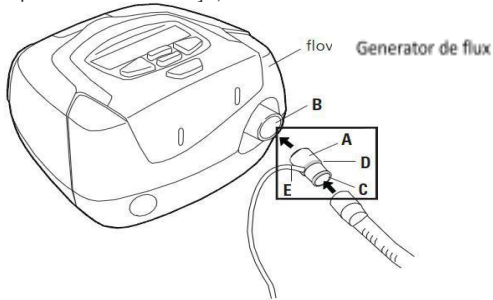

Curățare

- Spălați portul conectorului de oxigen în apă caldă, folosind un detergent delicat.
- Clătiți bine și lăsați să se usuce.

Eliminare

Portul conectorului de oxigen nu conține nicio substanță periculoasă și poate fi eliminată împreună cu deșeurile domestice normale.

Simbolurile care apar pe produs



Săgeata indică direcția fluxului de aer.

AVERTISMENTE

- Utilizați întotdeauna portul conectorului de oxigen ResMed când adăugați oxigen suplimentar la generatorul de flux.
- Debitul de oxigen trebuie să fie oprit când generatorul de flux nu funcționează, astfel încât oxigenul neutilizat să nu se acumuleze în interiorul acestuia și să creeze un risc de incendiu.
- Oxigenul susține arderea. Nu trebuie să fie utilizat oxigen în timp ce fumați sau în prezența unei flăcări deschise.
- Nu utilizați soluții de înălbire, clor, alcool sau soluții aromatate, săpunuri hidratante sau antibacteriene sau uleiuri parfumate pentru a curăța portul conectorului de oxigen. Aceste soluții pot să reacționeze cu plasticul și să reducă durata de viață a produselor.

ATENȚIE (NUMAI PENTRU S.U.A.)

Legea federală limitează vânzarea acestor dispozitive numai pe bază de prescripție medicală.