

## FIȘĂ TEHNICĂ

### HumidX™ / HumidX Plus – AirMini Producător ResMed

#### SPECIFICAȚII TEHNICE



#### DESCRIERE

##### Umidificare

Sistemul AirMini utilizează un umidificator fără apă care este conceput pentru a oferi mai mult confort terapiei dumneavoastră.

Acest lucru va îmbunătăți nivelul de umiditate din aerul respirat de dvs. și va oferi o ameliorare în cazul unei posibile uscăciuni.

Există diferite tipuri de umidificatoare fără apă care variaza în funcție de mască și cerințele de terapie:

- HumidX F20 - utilizat cu măștile F20 series pentru a oferi mai mult confort în cursul terapiei.
- HumidX™ (albastru) - punct de pornire pentru a identifica nivelul adecvat de umidificare.
- HumidX Plus (gri) - îmbunătățește în plus nivelul de umiditate și este util atunci când nivelul de umiditate ambiantă este foarte scăzut (de exemplu la altitudini mari, în aeronave).

##### Note:

- Umidificatorul fără apă nu trebuie spălat sau scufundat în apă, deoarece acest lucru va afecta performanța terapiei.
- Umidificatorul trebuie înlocuit în decurs de 30 de zile de la deschiderea ambalajului etanș.
- Umidificatorul este exclusiv pentru utilizare multiplă la un singur pacient.

## CARACTERISTICI

Disponibile si în seturi de cate 3 sau 6 pachete.

Mici, ușoare și simplu de utilizat.

Nu este necesară spălarea.

Utilizabile până la 30 de zile de la deschidere.

HumidiX si HumidX Plus sunt sisteme standard de umidificare fără apă compatibile cu mastile AirFit N20 și AirFit P10 pentru AirMini de la ResMed.

HumidiX si HumidX Plus sunt proiectate pentru a oferi mai mult confort prin îmbunătățirea nivelului de umiditate din aerul respirat, pentru a preveni aparitia uscăciunii nasului, gurii si gatului.

• Inspectați cu regularitate umidificatorul și respectați instrucțiunile de curățare și întreținere pentru a preveni dezvoltarea de microbi care să vă afecteze în mod negativ sănătatea.

**Umidificatorul nu poate fi spălat deoarece acest lucru va afecta performanța terapiei.**

Inspectați umidificatorul fără apă (HumidX, HumidX Plus, HumidX F20)

1. Verificați zilnic pentru depistarea eventualelor semne de deteriorare sau blocaje cauzate de murdărie sau praf.
2. Acesta trebuie înlocuit în decurs de 30 de zile de la deschiderea ambalajului etanș.
3. Când umidificatorul nu este utilizat, păstrați-l într-un loc curat și uscat.

Daca folositi HumidX/HumidX Plus și va apar picături de apă neconfortabile pe nas, în mască sau în tubulatura de aer - *Nivelul de umiditate este prea mare.*

Dacă se utilizează HumidX sau HumidX F20: Îndepărtați umidificatorul și încercați terapia fără umidificare.

Dacă se utilizează HumidX Plus: Încercați să înlocuiți cu HumidX. Aceasta va ajuta la reducerea picăturilor de apă.

Dacă întâmpinați în continuare probleme, contactați-vă furnizorul de dispozitive medicale.