

Fișă de specificații tehnice

Canulă nazală

Producător: Salter Labs

Canula nazală este utilizată pentru a administra oxigen suplimentar pacienților.

Indicații:

Canulele nazale sunt destinate utilizării la domiciliu, în ambulatoriu, pentru îngrijire extinsă, transport și mediul spitalicesc.

Caracteristici tehnice:

Grupa de vârstă: Canula nazala pentru adult.

De unică folosință, destinate utilizării de către un singur pacient.

A nu se steriliza.

Mențineți tubul drept și ferit de îndoituri.

Debit maxim livrat: 6 LPM (Litri Pe Minut)


Lungime tub: 2.1 metri

Descriere narine: siliconate pentru confort sporit, curbate si conice

Culoare: transparent/lucios

Tip conector la sursa de oxigen: universal (tip trompeta)

Ideală pentru utilizare de lunga durată

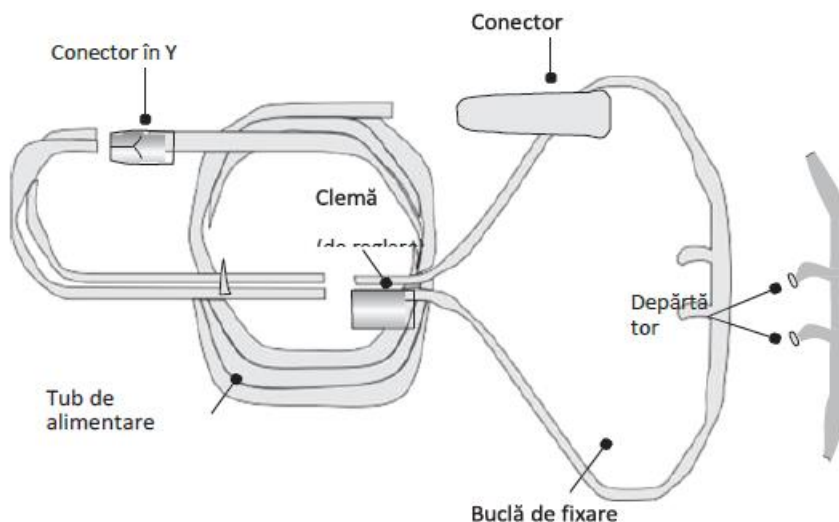

Canulă nazală





Producător: Salter Labs

Instrucțiuni de folosire:

1. Spălați-vă pe mâini. Scoateți canula nazală din pachet.
2. Atașați conectorul terminal la sursa de oxigen, de exemplu, tubul de prelungire pentru oxigen sau orificiul de control al debitului de oxigen.
3. Reglați butonul de control al debitului la debitul prevăzut. Verificați debitul gazului la nivelul canulei.
4. a - Poziționați canula nazală cu depărtătoarele nazale orientate în sus și curbate spre față.
b – Introduceți cele două depărtătoare nazale în nări.
5. a – Înfășurați bucla de fixare la ureche în sus și peste ambele urechi.
b – Amplasare alternativă: Fixați bucla de fixare la ureche în spatele capului.
6. a – Strângeți părțile laterale ale clemei și ridicați-o până sub bărbie.
b – Lăsați suficient spațiu cât să încapă 2 degete între clemă și bărbie.

Instrucțiuni de îngrijire și curățare:


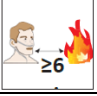
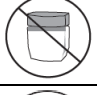
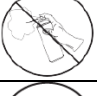

1. O dată pe zi, utilizați o lavetă umedă curată pentru a șterge depărtătoarele nazale și tuburile.
2. Nu utilizați detergenți puternici sau parfumați, produse degresante, produse pe bază de alcool sau săpunuri cremă pentru curățarea canulei nazale.
3. Nu sterilizați canula nazală.
4. Aruncați canula nazală și înlocuiți-o cu una nouă atunci când se murdărește, se decolorează sau depărtătoarele devin rigide. Se recomandă înlocuirea canulei nazale cel puțin o dată la 14 zile. Nu utilizați canula nazală mai mult de 30 de zile.

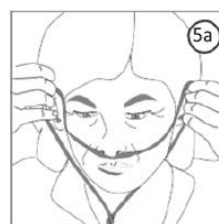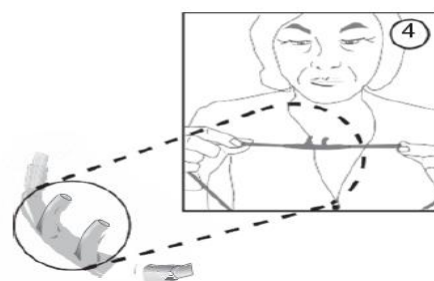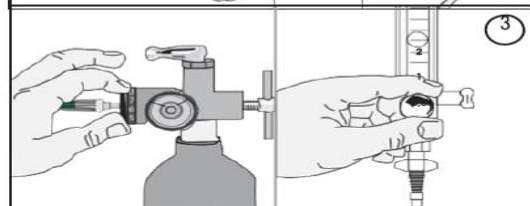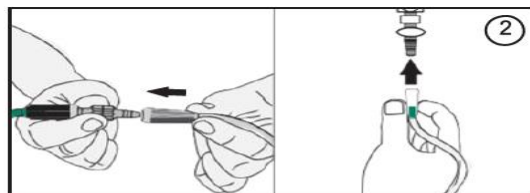


Canulă nazală

Producător: Salter Labs

Măsuri de siguranță:

	Nu fumați și nu permiteți nimănui să fumeze în jurul dumneavoastră. Aici sunt incluse, fără a se limita la țigări, pipe, trabucuri și țigări electronice (vapori).
	Păstrați echipamentele de oxigen la cel puțin 6 picioare (aprox. 1,8 m) distanță de flăcări sau de orice sursă de căldură, de exemplu șeminee, sobe, grătare și radiatoare.
	Nu utilizați produse pe bază de petrol sau creme și loțiuni pe bază de ulei în sau în jurul nasului. De exemplu, nu aplicați vaselină în jurul nărilor sau în nări.
	Nu utilizați produse inflamabile, precum spray-uri cu aerosoli sau produse de curățare. În timp ce purtați canula nazală sau în jurul sursei de oxigen.
	Evitați utilizarea echipamentelor electrice care poate genera o scânteie, de exemplu, aparatul de ras electric, uscătorul de păr sau ondulatorul.

- Nu răsuciți, nu îndoiți și nu legați tuburile de oxigen.
- Nu așezați nimic pe tuburi care ar putea împiedica fluxul.
- Păstrați tuburile în exces înfășurate în mod liber și într-un loc ferit, pentru a nu vă împiedica de acestea.
- Nu așezați tuburile de alimentare cu oxigen sau canula nazală sub pături, cuverturi, covoare etc.
- Fiți atenți pentru a evita ca tuburile de oxigen să se blocheze în piesele de mobilier.
- Păstrați la îndemână o canulă nazală suplimentară și alte surse de oxigen disponibile pentru utilizare.
- Nu lăsați copiii sau animalele de companie să se joace cu canula nazală și echipamentul de oxigen.
- Se recomandă utilizarea adaptorului pivotant pentru canula nazală și a unui tub de alimentare de peste 4,2 m.
- Dacă utilizați un umidificator, adăugați un colector pentru a aduna excesul de umiditate în tubul de alimentare.
- Marcaje conform normelor în vigoare:

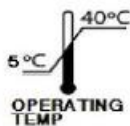

RX ONLY

